

WIVA FASS-4 låg



Griplåg



Planlåg



Klicklåg



Sterilid

Alle fire låg-typer:

Materiale	<ul style="list-style-type: none">- polypropylen (PP)- Grip-, Plan- og Klicklåg er forsynet med klæbrig pakning- Sterilid er forsynet med gummipakning
Farve	<ul style="list-style-type: none">- Grip-, Plan og Klicklåg – gul, blå eller sort (andre farver efter ønske)- Sterilid - orange

Klicklåg:

- Klicklåget har et låg i midten, som kan lukkes midlertidigt og åbnes igen.
- Denne lågtype er velegnet i områder, hvor WIVA FASS-4 står i nogen tid, eller i områder, hvor der er tale om mindre stykker affald.
- På det medicinske affaldsmarked er Klicklåget's brugervenlighed og sikkerhed uforlignelig.
- Midterlåget er også forsynet med den specielle klæbrige pakning, som garanterer tæt lukning.

Sterilid:

- Der sker en mærkbar anvendelse af autoklaver til forbehandling og sterilisation af affaldsmateriale som sygdomsfremkaldende hospitalsaffald.
- Maskiner i denne kategori arbejder stort set efter de samme principper, som den originale autoklave, idet de er i stand til at neutralisere potentielle smittebærende agenter, ved at benytte damp under tryk og overophedet vand.
- Mauser Benelux B.V. har udviklet **sterilid** låget til affaldskategorierne UN 2814 (farlig for mennesker) og UN 2900 (kun farlig for dyr).
- Kort tid efter at autoklaveringsprocessen er startet, smelter det transparente inderlåg og falder ned i WIVA FASS-4 affaldscontaineren.
- Den store åbning i **sterilid** låget gør, at dampen, der er under tryk, let trænger ind i det farlige kliniske affald.